



Clinical Experience



Technical Competence

## EasyFlow nCPAP

Tillbehör till noninvasivt ventilationssystem för neonatalvård

- + Mycket mjuk, flexibel prong
- + Självtätande mask
- + Polstrat och icke-häftande pannskydd med mjukt silikongel, placeras direkt på pannan
- + Flexibelt huvudband som alternativ till en traditionell mössa


### Nyhet:

- + Nu med pannskydd med silikongel och huvudband



# EasyFlow nCPAP

Det nya EasyFlow-systemet från Fritz Stephan GmbH anpassas optimalt till anatomin hos prematura och nyfödda barn. Prong och masker med perfekt passform är en avgörande förutsättning för en skonsam, noninvasiv ventilation. EasyFlow-systemet är enkelt att använda och integrerar perfekt med neonatal-ventilationssystemen SOPHIE och STEPHANIE.

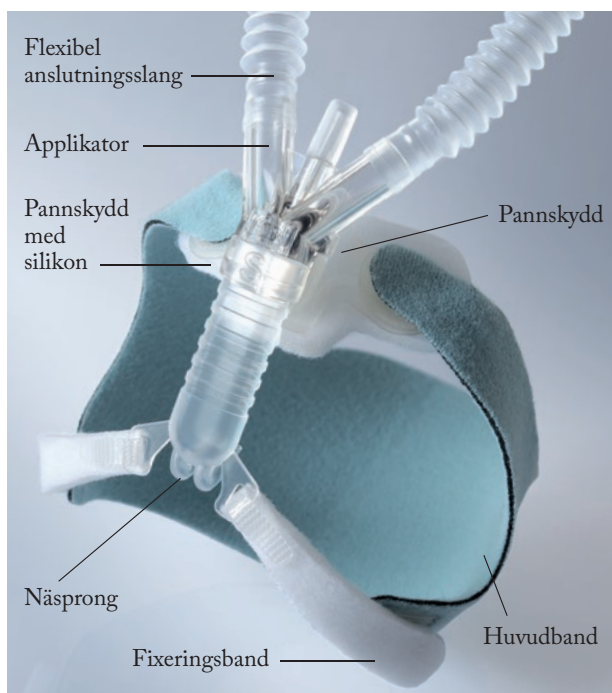

Det här användarvänliga systemtillbehöret består av det nya huvudbandet, ett pannskydd med silikongel, applikatorfäste med en metalldel, en applikator med magnet och ett prong (för båda näsborrarna) eller en mask. Längden och höjden kan justeras steglöst. Flexibel anslutningsslang och en medicinsk nebulisator kan anslutas om så önskas.

Alla systemkomponenter är enkla att använda och att anpassa optimalt till den individuella anatomin hos nyfödda.

Olika storlekar: Flexibla justerbara huvudband som finns i tre storlekar. EasyFlow nCPAP – perfekt passform, bekvämt och pålitligt.

Det nya polstrade pannskyddet med silikon fäster vid pannan tack vare gelstrukturens fästegenskaper. Ingen ytterligare fixering behövs. Det biokompatibla silikongelelet innehåller inga lösningsmedel.

Med hjälp av **huvudbandet** som finns i tre storlekar kan sköterskan kontrollera att huvudsetet är exakt anpassat till huvudets omkrets. Huvudbandet kan endast användas för fästning av prong för båda näsborrarna eller masker med mjuka fixeringsband. Det är gjort av ett mjukt och biokompatibelt material med kardborrband för att fästa **fixeringsbanden**.

Mycket mjukt och flexibelt silikongummi av högsta kvalitet används för att ge maximal komfort.

**Näspronget** irriterar varken hud eller slemhinnor och har en perfekt anatomisk utformning som gör att det inte belastar nässkiljeväggen.

**Masken** har en specialanpassad bälgutformning för att ge optimal passform, och den är även självtätande.

Det **polstrade pannskyddet med silikongel** utgör fäste för **applikatorn**, dit slangarna och näspronget eller masken kopplas. En integrerad magnet gör att applikatorn kan positioneras på applikatorfästet med millimeterprecision för att ge optimal tryckavlastning.


**Flexibel anslutningsslang** ökar komforten och underlättar inkopplingen. De minskar tryckbelastningen från de tunga ventilationsslångarna avsevärt och gör det enkelt att koppla bort dem från patientens näsa.







Responsiva och pålitliga nCPAP-patientgränssnitt har avgörande betydelse för att den noninvasiva ventilationsbehandlingen ska lyckas. Det nya pannskyddet med silikongel kan fästas mot patientens panna direkt efter att det tagits ut ur förpackningen. Du behöver eventuellt ta bort lite fostertalg först. Med hjälp av pronget får patienten en fullgod nCPAP-behandling tills en mer omvårdande behandling kan påbörjas på neonatal avdelningen.

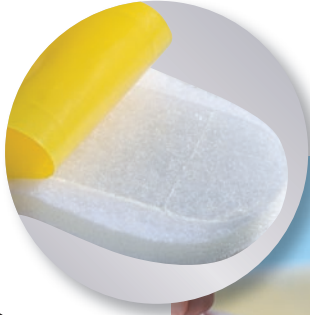

När det är dags att flytta över patienten till rutinbehandling kan de flexibla justerbara huvudbanden användas. Huvudbandet kan användas för festsättning av prong eller masker med mjuka fixeringsband som fästs med kardborrband.


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






Våra mössor med färgkodning för de 11 olika storlekarna och dokumenterat goda användningsegenskaper är fortfarande tillgängliga. De hudvänliga materialen har testats noggrant i kliniska miljöer och har många fördelar. EasyFlow nCPAP-mössor – perfekt passform, bekväma och säkra.





## EasyFlow nCPAP: översikt över tillbehör

Mössa (levereras inklusive pannstöd och fixeringsband)					
Storlek	Färg	Huvudomkrets	Vikt	Antal	Artikelnummer
XS		20 - 22 cm	500 - 700 g	1	1 701 61 019
S		22 - 24 cm	700 - 900 g	1	1 701 61 020
M		24 - 26 cm	900 - 1.200 g	1	1 701 61 021
L		26 - 28 cm	1.200 - 1.600 g	1	1 701 61 022
XL		28 - 30 cm	1.600 - 2.400 g	1	1 701 61 023
XXL		30 - 33 cm	2.400 - 3.000 g	1	1 701 61 024
3XL		33 - 36 cm	3.000 - 4.200 g	1	1 701 61 025
4XL		36 - 39 cm	4.200 - 6.000 g	1	1 701 61 026
5XL		39 - 42 cm	6.000 - 7.300 g	1	1 701 61 027
6XL		42 - 45 cm	7.300 - 8.800 g	1	1 701 61 028
7XL		45 - 48 cm	> 8.800 g	1	1 701 61 029

Huvudband micro, set, artikelnummer 1 701 61 040			
består av:	Huvudomkrets	Vikt	
Huvudband micro	20 - 28 cm	500 - 1.350 g	
2 st. fixeringsband, vita			
Pannstöd			

Huvudband mini, set, artikelnummer 1 701 61 041			
består av:	Huvudomkrets	Vikt	
Huvudband mini	28 - 36 cm	1.350 - 3.700 g	
2 st. fixeringsband, vita			
Pannstöd			

Huvudband maxi, set, artikelnummer 1 701 61 042			
består av:	Huvudomkrets	Vikt	
Huvudband maxi	36 - 48 cm	3.700 - 8.400 g	
2 st. fixeringsband, vita, långa			
Pannstöd			

	Antal	Artikelnummer
Polstrat pannskydd med mjukt silikongel	5	1 701 61 018
Polstrat pannskydd	5	1 701 61 017

	Antal	Artikelnummer
Applikator med magnet och tryckförslutande kåpa	5	1 701 61 161
Flexibel anslutningsslangset Ø 10 mm	5	1 701 63 408
Flexibel anslutningsslangset Ø 12 mm (F&P)	5	1 701 63 409
Förlängning till mask/prong	5	1 701 61 000

Prong		
Storlek	Antal	Artikelnummer
S	5	1 701 61 001
M	5	1 701 61 002
L	5	1 701 61 003
XL	5	1 701 61 004

Masker		
Storlek	Antal	Artikelnummer
XS	5	1 701 61 005
S	5	1 701 61 012
M	5	1 701 61 013
L	5	1 701 61 014
XL	5	1 701 61 015



# EasyFlow nCPAP

Det nya EasyFlow-systemet från Fritz Stephan GmbH är kompatibelt med flera olika ventilatormodeller på den svenska marknaden.

Kombinationen av EasyFlow nCPAP med Fisher and Paykels befuktare MR850, befuktarkammare MR290 och patientkrets RT235 har testats och godkänts av Fritz Stephan GmbH för användning av följande produkter:

- Babylog® VN500 – Dräger AG & Co. KGaA
- Babylog® 8000 Plus – Dräger AG & Co. KGaA
- Servo-i/ Servo-n – Maquet GmbH & Co. KG
- Leoni Plus/ Leoni II – Mobil – Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
- Fabian + nCPAP/ Fabian Evolution/ Fabian HFO – Acutronic Medical System AG
- Bubble CPAP (BC161) – Fisher and Paykel Healthcare Limited
- AVEA® - CareFusion GmbH

Kombinationen av EasyFlow nCPAP med Wilamed Aircons befuktare och patientkrets Intersurgical BC6188/ 10mm har testats och godkänts av Fritz Stephan GmbH för användning av följande produkter:

- SLE 6000 – SLE Limited

## Svensk återförsäljare



Aspira Medical AB  
Duvnäs  
781 90 Borlänge  
Tel: 0243-23 05 00  
[info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)  
[www.aspira.se](http://www.aspira.se)